



Blutzucker-Messgerät




Stechhilfe

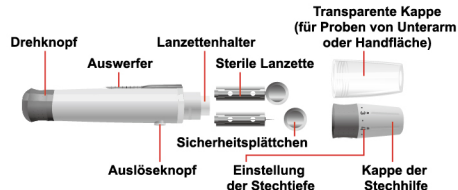

Teststreifen

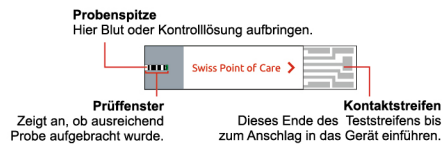

Gerätedisplay

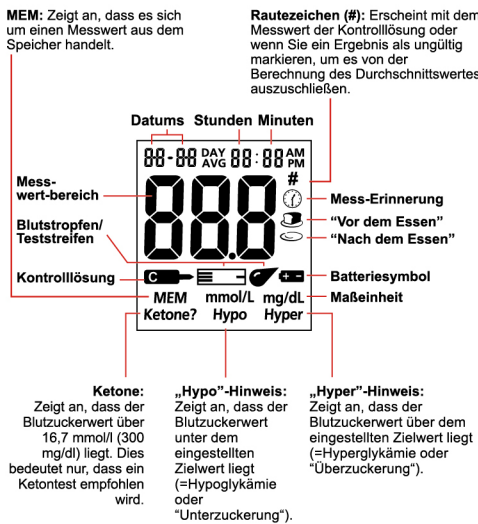


Probennahme

WICHTIG:

Vor der Probennahme reinigen Sie die entsprechende Hautstelle mit einem Alkoholtupfer oder Seifenwasser. Bei Bedarf warmes Wasser verwenden, um den Blutstrom anzuregen. Dann Hände und Probennahmestelle abtrocknen.


- Schrauben Sie den Verschluss der Stechhilfe ab. Setzen Sie eine sterile Lanzette in den Lanzettenhalter und drücken Sie sie bis zum Anschlag in die Stechhilfe.

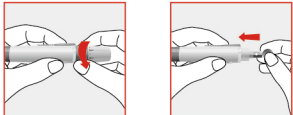


- Halten Sie die Lanzette in der Stechhilfe fest. Drehen Sie nun die Stechhilfe, so dass sich das Sicherheitsplättchen der Lanzette löst. Entfernen Sie dann das Sicherheitsplättchen und bewahren Sie ihn für die Entsorgung der Lanzette auf.



- Schrauben Sie sorgfältig den Verschluss wieder auf die Stechhilfe, ohne mit der nun freiliegenden Nadel in Kontakt zu kommen. Der Verschluss muss fest auf der Stechhilfe sitzen.

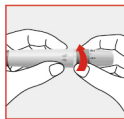

- Justieren Sie die Stechtiefe durch Drehen des Verschlusses der Stechhilfe. Es gibt 11 Stufen für die Stechtiefe. Zur Minimierung der Unannehmlichkeit verwenden Sie die geringste Stechtiefe, mit der Sie noch einen ausreichend großen Blutstropfen erzielen.

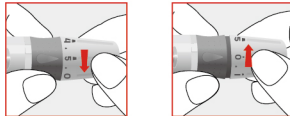

Einstellungen:

- 0 - 1,5 für zarte, empfindliche Haut
- 2 - 3,5 für normale Haut
- 4 - 5 für Hornhaut oder besonders dicke Haut


Hinweis:

Durch erhöhten Druck auf die Stechhilfe beim Einstich erhöht sich auch die Stechtiefe.

- Ziehen Sie den Drehknopf heraus, um die Stechhilfe einzustellen.



- Halten Sie die Stechhilfe seitlich gegen den Probennahme-Finger; der Verschluss liegt am Finger auf. Drücken Sie nun auf den Auslöseknopf, um den Einstich auszulösen.

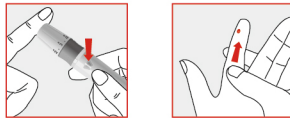

Weitere Informationen zur Messung von Blutproben von Unterarm oder Handfläche finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Messung


HINWEIS: Die Maßeinheit (mg/dl oder mmol/l) muss in den Einstellungen ausgewählt werden, bevor ein Test durchgeführt werden kann. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Maßeinheit gewählt werden soll.

- Führen Sie Teststreifen in das Gerät ein (mit den Kontaktstreifen zuerst; diese müssen nach oben zeigen). Hierdurch schaltet sich das Gerät ein und zeigt alle Displaysegmente an. Danach erscheint ein Bindestrich, der sich im Display bewegt. Prüfen Sie das Display erneut auf unrichtige Segmente oder Symbole, die permanent angezeigt werden.



NICHT BEREIT NICHT BEREIT NICHT BEREIT


- Das Messgerät ist für den Test bereit, wenn das blinkende Blutstrobe / Streifen-Symbol angezeigt wird. Der Teststreifen ist ordnungsgemäß eingelegt und Sie können eine Blutprobe auftragen.

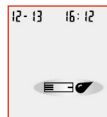

BEREIT

Numer: 1151354601
Stand der Information: 2021-12-10

- Berühren Sie den Blutstropfen mit dem Ende des Teststreifens. Bei eingeschalteter Audio-Funktion ertönt ein Piepton, wenn genügend Probe aufgenommen und die Messung gestartet wurde. Falls Sie einen Blutstropfen aufgebracht haben, der Countdown aber nicht beginnt, können Sie innerhalb von 3 Sekunden einen zweiten Blutstropfen aufbringen.

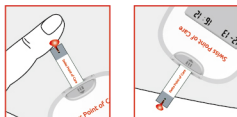

Hinweis:

- Bringen Sie die Probe NICHT auf die Vorder- und Rückseite des Teststreifens auf.
- Verschmieren Sie den Blutstropfen NICHT auf dem Teststreifen.
- Drücken Sie NICHT mit dem Finger gegen den Teststreifen.




Richtig

Falsch

Füllt sich das Prüffenster nicht, aber der Countdown beginnt, so fügen Sie dem Teststreifen kein weiteres Blut hinzu, da Sie sonst eventuell eine E-5-Meldung oder ein fehlerhaftes Messergebnis erhalten. Wenn der


Countdown beginnt, das Prüffenster sich aber nicht füllt, werfen Sie bitte den Teststreifen und wiederholen die Messung mit einem neuen Teststreifen.

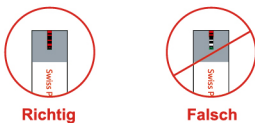

Richtig

Falsch

- Nach genügender Probenaufnahme im Teststreifen zeigt das Gerät den Countdown von 3 bis 1 an und dann das Messergebnis.

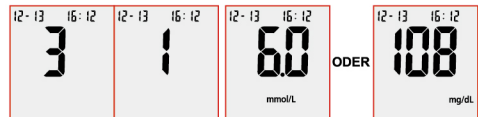

Die Testergebnisse werden abhängig von Ihrer Auswahl entweder in mmol/l oder mg/dl angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Maßeinheit Sie wählen sollen.


- Nach der Prüfung nehmen Sie die gültigen Messwerte mit Datum und Uhrzeit in Ihr Logbuch auf und vergleichen Sie mit den Zielwerten, die Ihr Arzt oder Diabetesberater/in festgelegt hat.

- Schieben Sie die Auswurfaste nach vorn, um den benutzten Teststreifen auszuwerfen.

Verwendung des Messwert-Speichers


Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die ◀ -Taste, um das Gerät einzuschalten und in den Memory (Speicher)-Modus zu gelangen. Im Display erscheint das letzte Ergebnis und die Abkürzung „MEM“. Datum und Uhrzeit werden mit den gespeicherten Ergebnissen angezeigt.

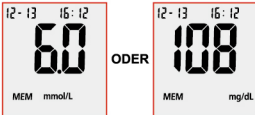

- Drücken Sie die ◀ -Taste, um die gespeicherten Daten durchzusehen.

- Drücken Sie die ▶ -Taste, um die Datendurchschnittswerte anzuzeigen. Im Display erscheint „DAY AVG“ (Tagesdurchschnittswerte).

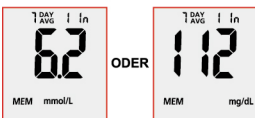

- Drücken Sie die ◀ -Taste, um zwischen den allgemeinen 7, 14, 30, 60 und 90-Tages-Durchschnittswerten hin- und herzuschalten.

- Drücken Sie zum Ausschalten des Displays die ▶ -Taste.

Problemlösung

Das Gerät hat automatische Fehlermeldungen als Hinweis auf Probleme. Notieren Sie sich die Fehlernummer. Schalten Sie dann das Gerät aus und befolgen Sie nachstehende Instruktionen.

Display	Ursachen	Problemlösung
Gerät schaltet nicht ein	Die Batterien könnten beschädigt oder nicht aufgeladen sein.	Ersetzen Sie die Batterien.
	Das Gerät ist zu kalt	War das Gerät kalten Temperaturen ausgesetzt, warten Sie 30 Minuten, bis es Zimmertemperatur erreicht. Wiederholen Sie dann die Messung.
E-1	Fehler bei der Geräte-Selbstprüfung beim Einschalten	Nehmen Sie die Batterien 30 Sekunden lang heraus und legen Sie sie dann wieder ein. Schalten Sie das Messgerät wieder ein. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.
E-1	Fehler bei der internen Kalibrierprüfung	Gerät ausschalten, Teststreifen entnehmen, wieder einschalten und Messung wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.
E-2	Teststreifen während der Messung entnommen	Messung wiederholen, dabei Teststreifen im Gerät belassen.
E-3	Probe zu früh auf den Teststreifen aufgebracht	Messung wiederholen und Blutprobe aufbringen, wenn das Symbol "Blutstropfen/Teststreifen" erscheint.
E-4	Teststreifen verunreinigt oder bereits benutzt	Messung mit einem neuen Teststreifen wiederholen.
E-4	Probe zu früh auf den Teststreifen aufgebracht	Messung wiederholen und Blutprobe aufbringen, wenn das Symbol "Blutstropfen/Teststreifen" erscheint.
E-5	Probenvolumen unzureichend	Test wiederholen, dabei ausreichend Probe aufbringen, um das Fenster im Teststreifen auszufüllen.
E-5	Probenbearbeitungsfehler durch zu spätes Nachbessern des Probenvolumens.	Test wiederholen, dabei ausreichend Blut aufbringen, um das Fenster im Teststreifen innerhalb von 3 Sekunden zu füllen.
H-1	Betriebstemperatur überschritten (zu hoch)	Wiederholen Sie die Messung in einer kühleren Umgebung.
L-1	Betriebstemperatur nicht erreicht (zu niedrig)	Wiederholen Sie die Messung in einer wärmeren Umgebung.
	Die Batterien sind schwach, haben aber genug Energie, um 20 weitere Tests durchzuführen.	Die "Testergebnisse sind weiterhin genau, aber ersetzen Sie die Batterien so bald wie möglich.
E-6	Batterien so bald wie möglich. Die Batterien sind entladen und das Messgerät lässt keine weiteren Tests zu, bis zwei neue Batterien eingelegt wurden.	Ersetzen Sie die Batterien und wiederholen Sie den Test.
E-8	Fehler der elektronischen Messung	Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.
E-9	Kein Swiss Point of Care Teststreifen im Messgerät	Nur Swiss Point of Care Teststreifen mit dem Swiss Point of Care Blutzucker-Messgerät verwenden. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.
E-9	Teststreifen beschädigt oder Kalibrierfehler	Messung mit neuem Teststreifen wiederholen. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.
E-10	Kommunikationsfehler	Fehler bei der Datenübertragung auf den PC. Hinweise zur Problemlösung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Diabetes Management Software.
E-12	USB-Kabel befindet sich im Datenübertragungsanschluss, während das Gerät auf die Probenbearbeitung wartet (Teststreifen bereits eingeführt)	USB-Kabel aus dem Gerät nehmen, Teststreifen entnehmen. Dann Teststreifen zur Messung wieder einführen. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.

Blutzucker-Monitoringsystem

Kurzanleitung

ACON Laboratories, Inc.
5850 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA
www.aconlabs.com

Gehen Sie zu:
www.swisspointofcare.com