

Para verificar el desempeño del Sistema Óptico del Medidor Mission® Plus Hb Hemoglobina.

Para uso diagnóstico in vitro únicamente.

USO PROPUESTO

La Tira de Control Mission® Plus Hb Hemoglobina es una tira de plástico consistente, en la cual se pega una almohadilla referencial marrón en la parte posterior de la tira para verificar el desempeño del sistema óptico del Medidor Mission® Plus Hb Hemoglobina. La almohadilla de referencia de la Tira de Control Mission® Plus Hb Hemoglobina tiene un valor referencial estandarizado para el sistema óptico. Después que la tira de control se inserta en el medidor, El medidor compara el valor de la reflectancia al valor pre-calibrado almacenado en el software del medidor. Si en la pantalla del medidor aparece **YES (SI)** el sistema óptico está trabajando apropiadamente, si aparece **NO**, entonces no está trabajando de acuerdo a lo esperado. Contacte con su distribuidor local para mayores detalles.

PRECAUCIONES

- Para diagnóstico *in vitro* únicamente.
- La tira debe permanecer en su envase cerrado hasta el momento de usarla.
- No use la tira después de la fecha de expiración.
- Mantenga la tira de control limpia. No toque la almohadilla referencial marrón de la parte posterior.
- No doble la tira de control.
- No use tiras de control contaminadas, descoloridas, dobladas o malogradas.

ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

Almacene como vienen empacadas en el envase cerrado a temperatura ambiente (2-30°C). Manténgalas fuera del alcance de luz solar directa, temperatura extrema y humedad. Retire la tira del envase y úsela inmediatamente. Cierre el envase herméticamente inmediatamente después de retirar la tira del envase.

MATERIALES

Materiales Proveídos

- Tiras de Control
- Inserto

Materiales Requeridos Pero No Proveídos

- Medidor Hb Hemoglobina
- Manual de Usuario

DIRECCIONES DE USO

Permita que el Medidor y las Tiras de Control Mission® Plus Hb Hemoglobina alcancen temperatura ambiente (15-30°C) antes de empezar los exámenes. Consulte con el Manual de Usuario del Sistema de Exámenes Hb Hemoglobina para instrucciones detalladas.

1. Retire la Tira de Control Mission® Plus Hb Hemoglobina del envase cerrado. Inmediatamente después de retirar la tira cierre el envase herméticamente.
2. Entre al submenú del Verificador Óptico desde el programa de la pantalla.
3. Espere que destelle el símbolo de la tira en la pantalla del medidor. Inserte la Tira de Control completamente en el canal de la tira en la misma dirección que señalan las flechas impresas en la tira.

Nota: Asegúrese que la tira esté insertada completamente para obtener resultados precisos.

4. Presione el botón del medio para empezar la verificación óptica.
5. Si en la pantalla del medidor aparece **YES (SI)**, el sistema óptico está trabajando apropiadamente. Consulte con el Manual del Usuario para “desempeño usual de exámenes de muestras.” Si la pantalla del medidor muestra **NO**, el sistema óptico no está trabajando apropiadamente. Repita la prueba utilizando una nueva Tira de Control que no esté contaminada, doblada, descolorida o malograda.
6. Si la pantalla del medidor muestra **NO** después de haber realizado el Nuevo Examen, contacte a su distribuidor local para asistencia posterior.

LIMITACIONES

1. Esta Verificación Óptica debe realizarse bajo condiciones de alumbrado normales de laboratorio.
2. No realice este examen bajo condiciones de alumbrado extremas.

Índice of Símbolos

	Consulte instrucciones de uso		Usado por	REF	Catálogo #
	Para diagnóstico <i>in vitro</i> únicamente		Número de Lote		Contiene suficiente para <n> exámenes
	Almacene entre 2-30°C		Fabricante		Representante Autorizado



ACON Laboratories, Inc.
10125 Mesa Rim Road,
San Diego, CA 92121, USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Número: 1150648301

Fecha de Vigencia: 2011-09-16