



Swiss Point of Care

Solution de Contrôle de Glucose

Mode d'Emploi

REF G125-92HB

Français

PRINCIPE ET DOMAINE D'UTILISATION

La solution de contrôle Swiss Point of Care contient un taux de glucose connu. Elle est utilisée pour confirmer que le glucomètre Swiss Point of Care et les bandelettes fonctionnent correctement et que le test se déroule également correctement.

Il est conseillé d'effectuer un test de contrôle qualité dans tous les cas suivants:

- Avant la première utilisation du glucomètre, ce qui vous permettra de vous habituer à ce test.
- Avant d'utiliser un nouveau lot de bandelettes.
- Lorsque le glucomètre ou les bandelettes semblent ne pas fonctionner correctement.
- Si vous pensez que les résultats sont faux ou s'ils ne correspondent pas à votre état général.
- Si vous pensez que votre glucomètre est endommagé.
- Au moins une fois par semaine.
- Après avoir nettoyé le glucomètre.

Trois niveaux de contrôle de solution sont disponibles: solution de contrôle 0, solution de contrôle 1 et solution de contrôle 2. La solution de contrôle 1 suffit aux besoins courants lors d'autotests. Si vous pensez que votre glucomètre ou vos bandelettes ne donnent pas de résultats adéquats, utilisez le test de niveau 0 ou de niveau 2.

COMPOSITION

La solution de contrôle 0 contient moins de 0,1 % de glucose (principe actif). La solution de contrôle 1 contient moins de 0,2 % de glucose (principe actif). La solution de contrôle 2 contient moins de 0,4 % de glucose (principe actif). Les solutions contiennent des agents de conservation dans une solution aqueuse.

CONSERVATION ET MANIPULATION

- Conserver la solution de contrôle à température ambiante (2-35 °C) (36-95 °F).
- Ne pas conserver dans le réfrigérateur ou le congélateur.
- Ne pas utiliser la solution de contrôle si elle est froide: l'équilibrer à température ambiante avant de l'utiliser.
- Utiliser avant la date d'expiration indiquée sur le flacon.
- Important:** Les dates de péremption sont indiquées en Année et Mois et Date.
- Ne pas utiliser la solution de contrôle au-delà de 6 mois après l'ouverture initiale du flacon. La solution de contrôle ne doit plus être utilisée au-delà de 6 mois après l'ouverture initiale du flacon. Notez la date d'expiration sur l'étiquette du flacon.

PRÉCAUTIONS

- Pour usage *in vitro*. N'utilisez la solution de contrôle que pour des tests en usage externe. Ne pas avaler ou injecter. Convient pour les autotests et usage professionnel.
- Agiter avant l'emploi.
- Pour obtenir des résultats adéquats, utilisez la solution de contrôle à des températures entre 10 et 40 °C (50-104 °F).
- La fourchette de contrôle indiquée sur le flacon des bandelettes (ou sur le sachet aluminium) n'est pas une fourchette recommandée pour votre glycémie. Votre taux de glycémie idéal est à fixer avec votre médecin traitant.
- Éviter le contact entre la zone de dépôt de la bandelette et le flacon de solution de contrôle; cela pourrait entraîner une contamination de la solution de contrôle.
- N'utiliser que la solution de contrôle de marque Swiss Point of Care avec le glucomètre de marque Swiss Point of Care et avec les bandelettes de marque Swiss Point of Care.

MATÉRIEL FOURNI

- Solution de Contrôle
- Mode d'Emploi

MATÉRIEL REQUIS MAIS NON FOURNI

- Glucomètre
- Bandelettes

MODE OPERATOIRE

1. Insérez une nouvelle bandelette pour mettre en marche le glucomètre. Vous trouverez les détails pour enregistrer les résultats des tests de contrôle et l'utilisation du glucomètre dans le mode d'emploi.
2. Agitez énergiquement le flacon de la solution de contrôle.
3. Appuyez doucement sur le flacon de la solution de contrôle, puis éliminer la première goutte. Si l'embout est bouché, le tapoter sur une surface dure et propre, agiter à nouveau le flacon qui est alors prêt à être utilisé.
4. Pressez une deuxième goutte sur une surface propre et non absorbante. Approchez l'extrémité de la bandelette de la goutte de la solution de contrôle et assurez-vous que la bandelette est suffisamment imbibée.
Remarque: Ne pas appliquer la solution de contrôle sur la bandelette directement du flacon.
Au cas où le compte à rebours ne se mettrait pas en marche après avoir mis une goutte de solution de contrôle, il est possible de rajouter une goutte dans les 3 secondes.
5. Lire le résultat sur l'écran du glucomètre.

RESULTATS ATTENDUS

Le résultat de test de la solution de contrôle doit être dans la page de contrôle. Les plages pour les trois solutions (CTRL 0, CTRL 1 et CTRL 2) sont affichées sur le flacon (ou la pochette) de bandelettes. Pour confirmer les résultats, la mesure de la solution de contrôle 0 devrait se situer dans la plage CTRL 0, celle de la solution de contrôle 1 devrait se situer dans la plage CTRL 1, et celle de la solution de contrôle 2 dans la plage CTRL 2. Lorsque le résultat des tests avec les solutions de contrôle tombent dans les plages de contrôle précises, cela indique que votre appareil de surveillance de glycémie fonctionne bien et que vous effectuez la procédure correctement.

Si les résultats des tests de contrôle ne sont pas compris dans la fourchette indiquée:

- Vérifiez la date d'expiration des bandelettes et de la solution de contrôle. Jetez les bandelettes et la solution de contrôle qui ont dépassé la date d'expiration.
- Assurez-vous que les tests ont été effectués à une température comprise entre 10-40°C (50-104°F).
- Assurez-vous que les capuchons des flacons de bandelettes et des flacons de solution de contrôle sont bien fermés.
- Confirmez que vous utilisez bien la solution de contrôle de marque Swiss Point of Care.
- Assurez-vous que vous suivez correctement la procédure indiquée.

Après avoir vérifié les points précédents, répétez le test de contrôle avec une nouvelle bandelette. Si les résultats se situent à nouveau en dehors de la plage indiquée sur l'étiquette du flacon de bandelettes ou sur le sachet aluminium, il est possible que votre glucomètre ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas n'utilisez pas le glucomètre pour tester votre glycémie. Prenez contact avec votre distributeur. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre glucomètre. Pour d'autres questions ou d'éventuels problèmes, prenez contact avec votre distributeur.

LISTE DES SYMBOLES

	Consultez le mode d'emploi		Péremption		Limite de température
	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>		Péremption		Niveau de contrôle
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Fabricant		Numéro de catalogue

ACON[®]
ACON Laboratories, Inc.
5850 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA
www.aconlabs.com

EC REF

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CE 0123

www.swisspointofcare.com

Numéro de: 1151362301
Date de prise d'effet: 2021-12-10