




Glucomètre

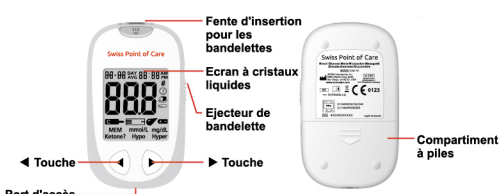

Stylo autopiqueur

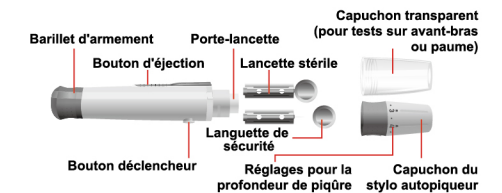

Bandelette

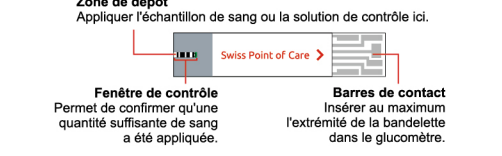

Ecran

MEM: Indique que le résultat est stocké dans la mémoire.

Symbole "dièse" (#): s'affiche également en même temps que le symbole "solution de contrôle".

Symbole "Ketone ?": apparaît lorsque votre glycémie est supérieure à 16,7 mmol/L (300 mg/dL), ce qui indique qu'une analyse de dépistage des cétones est conseillée.

Symbole "Hypo": Apparaît lorsque la glycémie est inférieure au "seuil hypoglycémie" (glycémie basse) que vous avez fixé.

Symbole "Hyper": Apparaît lorsque la glycémie est supérieure au "seuil hyperglycémie" (trop de sucre dans le sang) que vous avez fixé.

Symbole "Rappel de test"

Symbole "Avant le repas"

Symbole "Après le repas"

Symbole "pile"

Unité de mesure

Symbole "Ketone ?"

Symbole "Hypo"

Symbole "Hyper"

Prélever une goutte de sang

Important:

Avant de procéder à l'analyse, nettoyer le site de prélèvement avec un coton imbibé d'alcool ou avec de l'eau savonneuse. Si nécessaire, utiliser de l'eau chaude pour augmenter le flux sanguin. Ensuite, se sécher les mains et le site de prélèvement.

- Dévisser le capuchon du stylo autopiqueur. Insérez une lancette stérile dans le stylo autopiqueur et enfoncez complètement la lancette.
- Maintenir la lancette fermement dans le stylo autopiqueur et dévisser la languette de sécurité de la lancette, puis l'ôter de la lancette. Conserver la languette de sécurité pour l'élimination de la lancette.

Remarque:

Une plus grande pression du stylo autopiqueur sur le doigt augmente également la profondeur de piqûre.

- Tirer le barillet d'armement vers l'arrière afin d'armer le stylo autopiqueur.
- Positionner le capuchon du stylo autopiqueur sur le côté du doigt à piquer. Appuyer sur le bouton déclencheur afin de piquer le bout du doigt.

Voir le Manuel d'Utilisation pour de plus amples informations sur le test sur l'avant-bras ou dans la paume de la main.

Mesurer la glycémie


REMARQUE : L'unité de mesure (mg/dL ou mmol /L) doit être sélectionnée dans les réglages avant que tout test puisse être effectué. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé si vous ne savez pas quelle unité de mesure choisir .

- Insérer une bandelette dans la fente d'insertion, l'extrémité avec les barres de contact en premier et tournées vers le haut, afin de mettre en marche le glucomètre et d'afficher tous les segments d'affichage. Ensuite, un tiret va traverser l'écran. Vérifier l'écran pour confirmer que tous les segments d'affichage y figurent.
- Le glucomètre est prêt pour un test uniquement lorsque le symbole clignotant de la bandelette et de la goutte de sang apparaît. La bandelette est insérée correctement et une goutte de sang peut être appliquée.

Número: 1151354801

Date d'entrée en vigueur: 2021-12-10

3. Appliquer la goutte de sang sur la zone de dépôt de la bandelette. Si vous avez appliqué une goutte de sang mais que vous ne voyez pas le compte à rebours, vous devrez appliquer une deuxième goutte dans un délai de 3 secondes.

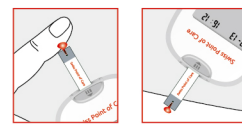


A NE PAS FAIRE:

- Appliquer la goutte de sang à l'avant ou à l'arrière de la bandelette.
- Etaler la goutte de sang sur la bandelette.
- Appuyer le doigt sur la bandelette.




Ne rajoutez pas de sang, si le compte à rebours commence sans que le hublot ne se remplisse. Vous risqueriez dans ce cas de déclencher un message E-5 ou obtenir un résultat erroné. Dans ce cas, jetez la bandelette et recommencez

l'opération avec une nouvelle bandelette.

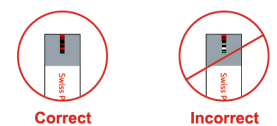

4. Le compte à rebours de 3 secondes débutera et les résultats s'afficheront.

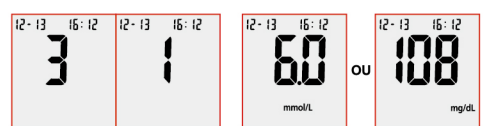

Les résultats des tests sont affichés en mmol / L ou mg / dL selon votre sélection. Consultez votre professionnel de la santé si vous ne savez pas quelle unité de mesure choisir.

5. Après vérification, enregistrer les résultats valides dans le carnet de suivi avec la date et l'heure, puis les comparer aux valeurs glycémiques à respecter établies par le diabétologue ou le médecin.

6. Faites glisser l'éjecteur de bandelettes pour jeter la bandelette usagée.

Utiliser la mémoire du glucomètre

Consulter les enregistrements en mémoire:

- Appuyer sur la touche ◀ afin de mettre le glucomètre en marche et d'intégrer le mode mémoire. La mesure la plus récente et le message "MEM" s'affichent sur l'écran. La date et l'heure s'affichent avec les résultats stockés en mémoire.
- Appuyer sur la touche ◀ pour passer d'un enregistrement en mémoire à un autre.
- Appuyer sur la touche ▶ pour voir la moyenne des mesures. Le message "DAY AVG" (moyenne par jour) s'affiche sur l'écran.
- Press the ◀ button to switch between the general 7, 14, 30, 60 and 90-day averages.
- Press the ▶ button to turn off the display.

Tableau de diagnostic des pannes

Lorsque des messages d'erreurs s'affichent, noter le numéro de l'erreur, puis suivre les instructions suivantes. Si le problème persiste, contactez votre distributeur local.

Affichage	Causes	Solution
Le glucomètre ne s'allume pas	Les piles peuvent être endommagées ou ne pas être chargées	Remplacez les piles.
E-0	Le glucomètre est trop froid	Si le glucomètre a été exposé ou rangé au froid, patientez 30 minutes pour lui permettre de se réchauffer à température ambiante, puis répétez le test.
E-1	Erreur lors de l'autotest d'alimentation	Retirez les piles pendant 30 secondes puis remplacez-les. Allumez le glucomètre à nouveau. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre distributeur.
E-2	Erreur lors de la vérification interne de l'étalonnage	Éteignez le glucomètre ou retirez la bandelette, puis rallumez le glucomètre pour tester de nouveau. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre distributeur.
E-3	La bandelette de test a été retirée pendant le test	Répétez le test en veillant à ce que bandelette de test reste en place.
E-4	L'échantillon a été appliqué trop tôt sur la bandelette	Répétez le test et appliquez l'échantillon après l'affichage du symbole de la goutte de sang/bandelette de test.
E-5	La bandelette de test est contaminée ou usagée	Répétez le test avec une nouvelle bandelette.
E-6	L'échantillon a été appliqué trop tôt sur la bandelette	Répétez le test et appliquez l'échantillon après l'affichage du symbole de la goutte de sang/bandelette de test.
E-7	Echantillon insuffisant	Répétez le test en appliquant un échantillon en quantité suffisante pour remplir la case de vérification de la bandelette.
E-8	Erreur d'application de l'échantillon en raison d'un re-dosage tardif de l'échantillon	Répétez le test en appliquant l'échantillon en quantité suffisante pour remplir la case de vérification de la bandelette en moins de 3 secondes.
E-9	La température a dépassé la température de fonctionnement du glucomètre	Déplacez le glucomètre dans un environnement plus frais et recommencez le test.
E-10	La température est inférieure à la température de fonctionnement du glucomètre	Déplacez le glucomètre dans un environnement plus chaud et recommencez le test.
E-11	Les piles sont faibles mais ont suffisamment de courant pour effectuer encore 20 tests	Les résultats des tests resteront précis, mais remplacez les piles dès que possible.
E-12	Les piles sont déchargées et le glucomètre ne permet pas de tests supplémentaires jusqu'à ce que les piles à plat soit remplacées par deux piles neuves	Remplacer les piles et répéter le test.
E-13	Panne de l'électronique du glucomètre	Si cela ne résout pas le problème, contactez votre distributeur.
E-14	Ce n'est pas une Bandelette de marque Swiss Point of Care qui est insérée dans le lecteur	Assurez-vous d'utiliser une bandelette de marque Swiss Point of Care avec le glucomètre Swiss Point of Care. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre distributeur.
E-15	La bandelette de test endommagée ou erreur de calibrage	Testez à nouveau en utilisant une nouvelle bandelette. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre distributeur.
E-16	Erreur de communication	Une erreur s'est produite pendant la transmission des données vers le PC. Consultez les instructions de dépannage dans la notice fournie avec le logiciel de gestion du diabète.
E-17	Le câble de transmission des données est branché dans le port de données du glucomètre alors que la bandelette est insérée dans la fente et que le glucomètre est en attente d'application de l'échantillon	Débranchez le câble de transmission de données du port de données du glucomètre, puis retirez la bandelette et réinsérez-la dans la fente d'insertion de bandelette pour effectuer le test. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre distributeur.

Swiss Point of Care

Système de Surveillance de la Glycémie

Guide de Référence Rapide



ACON Laboratories, Inc.
5850 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA
www.aconlabs.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

IVD

CE 0123

Allez sur le site:
www.swisspointofcare.com