


PRINCIPE ET UTILISATION PRÉVUE

Les tubes de transfert capillaires sont utilisés pour transférer des échantillons de sang. Le tube de transfert capillaire dispose d'un événement, positionné stratégiquement sur le bulbe en plastique, qui offre une ventilation automatique et un contrôle du volume d'échantillon. Le tube de transfert capillaire a une ligne de remplissage, qui indique que la bonne quantité d'échantillon a été collectée, et une pointe en verre utilisée pour collecter l'échantillon.

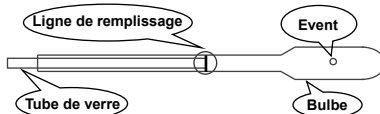

MODE D'EMPLOI

- Lors de la collecte de l'échantillon de sang dans le tube capillaire, il est important de ne pas presser l'ampoule et / ou couvrir l'événement. En tenant le tube incliné légèrement vers le bas, touchez la goutte de sang avec la pointe du tube capillaire. Le sang sera automatiquement aspiré jusqu'à la ligne de remplissage noire, et s'arrêtera.




Incorrect



Correct

Remarque: Ne jamais presser l'ampoule et / ou couvrir l'événement lors de la collecte d'un échantillon de sang.

- Assurez-vous que le sang atteigne la ligne noire, sinon il sera difficile d'expulser le sang du tube.

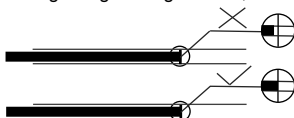

- Alignez la pointe du tube de transfert capillaire avec la zone d'application de l'échantillon sur le dispositif de test. Pressez le bulbe, et couvrez l'événement, pour appliquer l'échantillon de sang dans la zone d'application de l'échantillon.

Remarque: L'événement doit être recouvert lors de l'expulsion de l'échantillon de sang.

Le sang capillaire doit être testé immédiatement après la collecte.

Ne pas réutiliser le tube de transfert capillaire.



INDEX DES SYMBOLES

	Consultez les instructions d'utilisation		Utiliser avant		Numéro de lot
	A conserver entre 2 et 30 ° C		Fabricant		Numéro de catalogue
	Contient suffisamment de tests pour <n>		Représentant autorisé		Ne pas réutiliser