




Meter

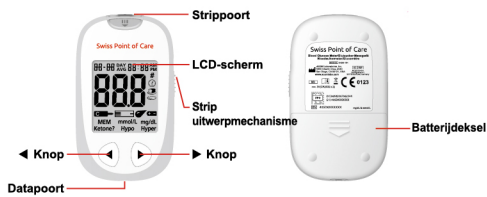


Prikpen

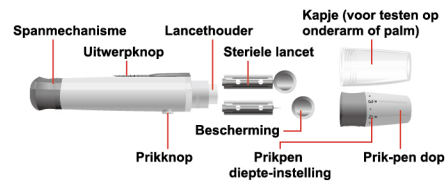

Teststrip

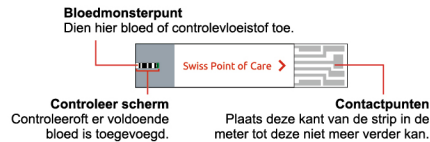

Display van meter

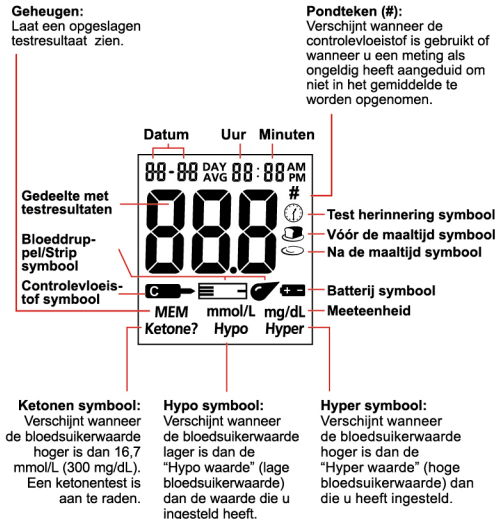


Het verkrijgen van een druppel bloed

BELANGRIJK:

Maak de plek van de testprik goed schoon met alcohol of warm water en zeep en droog uw handen goed af voordat u de testprik toedient.


1. Draai de dop van de prikpen. Plaats een steriele lancet in de prikpen totdat deze niet verder kan.

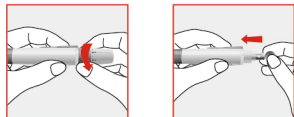


2. Houd de lancet vast en draai het beschermddopje van de lancet. Bewaar dit plastic beschermddopje om de lancet later veilig te kunnen weggooien.



3. Plaats de dop van de prikpen weer terug. Vermijd ieder contact met de lancet, dat de dop weer goed op de lancet wordt geplaatst.

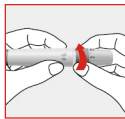

4. Bepaal de prikdiepte door de dop van de prikpen te draaien. Er zijn 11 mogelijke dieptes te selecteren. Kies de diepte waarbij u met het minste ongemak voldoende bloed krijgt.

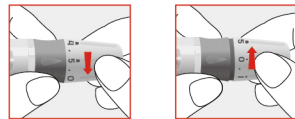

Aanpassingen:

0 - 1,5 voor kwetsbare huid

2 - 3,5 voor normale huid

4 - 5 voor dikke huid of eelt


Opmerking:

Meer druk op de prikpen zorgt ook voor een diepere prik.

5. Trek het spanmechanisme naar achteren tot u een klik hoort.



6. Houd de prikpen stevig tegen de zijkant van de vingertop. Druk op de prikknop om te prikken.

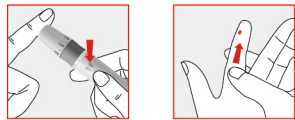


Zie de gebruikershandleiding voor het testen op de onderarm of op de palm van de hand.

Testen van bloedsuiker


OPMERKING: U moet in de instellingen de maateenheid (mg/dL of mmol/L) instellen voordat u kunt testen. Overleg met uw zorgverlener als u niet zeker weet welke maateenheid u moet kiezen.

1. Plaats een strip in de strippoort met de contactstrepen naar boven gericht. De meter wordt geactiveerd en geeft alle onderdelen weer, gevolgd door een bewegend streepje over het scherm. Controleer op het scherm of alle onderdelen actief worden zonder er een te missen.

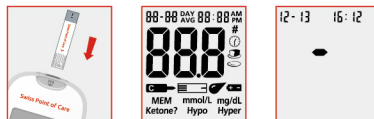

NIET GEREED NIET GEREED NIET GEREED


2. De meter is pas gereed voor het testen als het knipperende symbool van de bloeddruppel en het symbool van de strip verschijnt. De strip is juist geplaatst en u kunt een bloeddruppel toevoegen.

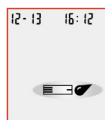

GEREED

Nummer: 1151354701
Ingangsdatum: 2021-12-10

3. Raak met het uiteinde van de strip de bloeddruppel aan. Als de audiofunctie aan staat, dan geeft de meter een piepgeluid om aan te geven dat er voldoende bloed is toegevoegd en dat de meting is gestart. Als u bloed toedient maar de meter telt niet terug, kunt u binnen 3 seconden extra bloed toevoegen.

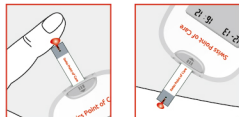

NIET DOEN:


- Bloed toevoegen aan de voor of achterkant van de teststrip.
- Bloed smeren op de teststrip.
- Vinger tegen de teststrip aan duwen.



Correct Niet correct


Als het controlescherm niet oploopt en de meter begint wel met terugtellen, voeg dan geen extra bloed toe. Als u dat wel doet, dan verschijnt de

foutcode E5 of een onjuist testresultaat. Indien de meter wel terugtelt maar het controlescherm loopt niet op, gooi de strip dan weg en start een nieuwe meting met een nieuwe teststrip.

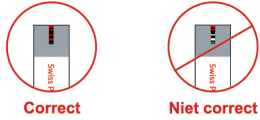

Correct Niet correct

4. De meter telt terug van 3 naar 1 en toont het meetresultaat.

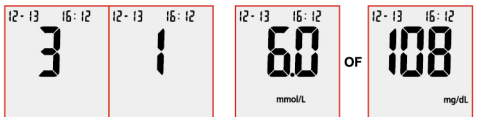

Afhankelijk van uw keuze worden de testresultaten weergegeven in mmol/L of mg/dL. Overleg met uw zorgverlener als u niet zeker weet welke maateenheid u moet kiezen.


5. Noteer na controle de testresultaten in uw logboek met datum en tijd en vergelijk deze met de doelen zoals die gesteld zijn door uw diabetesconsulent.

6. Schuif het uitwerpmechanisme van de strip naar voren om de teststrip te verwijderen.

Het geheugen van de meter gebruiken


Om opgeslagen resultaten te bekijken:

1. Druk op de ◀ knop om de meter aan te zetten en het geheugen uit te lezen. De meest recente meting en "MEM" verschijnt op het scherm. De datum en het tijdstip worden ook getoond.

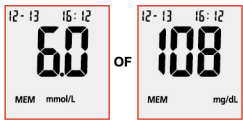

2. Druk op de ◀ knop om het vorige resultaat te tonen.

3. Druk op de ▶ knop om de gemiddelde waarden te zien. "DAY AVG" verschijnt op het scherm.

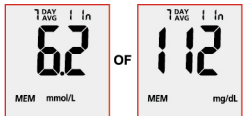

4. Druk op de ◀ knop om te wisselen tussen de algemene gemiddelden van 7, 14, 30, 60 en 90 dagen.

5. Druk op de ▶ knop om de meter uit te schakelen.

Problemen oplossen

De meter heeft ingebouwde meldingen om u te waarschuwen voor problemen. N Als er een foutmelding verschijnt, noteer deze foutmelding dan, zet de meter uit en volg onderstaande instructies.

Scherm	Oorzaak	Oplossing
De meter gaat niet aan	Batterijen kunnen beschadigd of niet opgeladen zijn De meter is te koud	Vervangen de batterijen. Als de meter op een koude plek is bewaard, wacht dan 30 minuten. Laat de meter eerst op kamertemperatuur komen en herhaal dan de test.
E-0	Fout tijdens zelfcontrole bij inschakelen	Verwijder de batterijen gedurende 30 seconden en plaats ze dan weer terug. Schakel de meter weer in. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw lokale verkoper.
E-1	Fout bij interne kalibratiecontrole	Schakel de meter uit of verwijder de teststrip en schakel de meter weer in voor een nieuwe test. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw lokale verkoper.
E-2	Teststrip is tijdens de test verwijderd	Herhaal de test en zorg ervoor dat de teststrip op zijn plek blijft.
E-3	Het bloedmonster is te vroeg op de teststrip aangebracht	Herhaal de test en breng het bloedmonster pas aan als het druppel/teststrip-symbool verschijnt.
E-4	De teststrip is vervuild of gebruikt	Herhaal de test met een nieuwe strip.
E-5	Het bloedmonster is te vroeg op de teststrip aangebracht	Herhaal de test en breng het bloedmonster pas aan als het druppel/teststrip-symbool verschijnt.
E-6	De hoeveelheid bloed is te klein	Herhaal de test en breng voldoende bloed aan dat het controlevenster van de strip opvult.
E-7	Fout bij aanbrengen van het bloed door late herdosering	Herhaal de test en breng binnen 3 seconden voldoende bloed aan dat het controlevenster van de strip opvult.
E-8	Temperatuur is hoger dan de bedrijfstemperatuur van het systeem	Ga naar een koelere plek en herhaal de test.
E-9	Temperatuur is lager dan de bedrijfstemperatuur van het systeem	Ga naar een warmere plek en herhaal de test.
E-10	De spanning van de batterijen is laag maar ze hebben nog voldoende stroom om nog 20 tests uit te voeren	De resultaten van de tests zullen nog steeds nauwkeurig zijn, maar vervang de batterijen zo snel mogelijk.
E-11	Batterijen zijn ontladen en de meter laat niet meer tests toe tot de lege batterij vervangen is door twee nieuwe batterijen	Vervang de batterijen en herhaal de test.
E-12	Defect van meterelektronica	Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw lokale verkoper.
E-13	Teststrip in de meter gedaan van een ander merk dan Swiss Point of Care	U dient voor de Swiss Point of Care-meter altijd gebruik te maken van Swiss Point of Care-teststrips.
E-14	Teststrip beschadigd of kalibratiefout	Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw lokale verkoper.
E-15	Communicatiestoring	Herhaal de test met een nieuwe strip.
E-16	De gegevenskabel wordt aangesloten op de datapoort van de meter terwijl de meter in de modus 'wachten op aanbrengen bloedmonster' staat en er een teststrip in de meter is gedaan	Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw lokale verkoper.

Bloedglucose Monitoringsysteem

Beknopte Handleiding

ACON Laboratories, Inc.
5850 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA

www.aconlabs.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

IVD

CE 0123

Ga naar:
www.swisspointofcare.com